



Scan QR koden for mere information

Alpha, Delta og Kappa

Madrasser

Brugermanual

Vigtig information

Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Brugermanualen henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse med brugen, servicering og vedligeholdelse af produktet.

Dato: 19-04-2017

Version: 5

Indholdsfortegnelse

1	FORMÅL OG SIKKERHED	4
1.1	Formål	4
1.2	Sikkerhedsinstruktioner	4
2	TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG DIMENSIONER	5
2.1	Alpha og Delta	5
2.2	Kappa	6
2.3	Forlængerstykke	6
2.4	Betræk	7
3	VEDLIGEHOLDELSE	7
3.1	Rengøring	7
3.2	Opbevaring	7
4	MILJØ OG KVALITET	8
4.1	Bortskaffelse	8
4.2	Kvalitetsgodkendelser	8
4.3	Symboler og forkortelser	9
5	TILBEHØR	10

1 FORMÅL OG SIKKERHED

I denne brugermanual beskrives tre forskellige typer af madrasser Alpha, Delta og Kappa, som hver har forskellige opbygninger afhængig af formålet.

1.1 Formål

Madrasserne er tiltænkt til anvendelse i Sundhedssektoren for brugere med risiko for udvikling af tryksår. Opbygningen af madrasserne er således, at brugeren bliver trykaflastet bedst muligt.

Madrasserne skal minimum belastes med 30 kg og må maksimalt belastes med 140 kg.

Note: Brug aldrig madrasserne til andre formål end oprindelig tiltænkt.

Illustrationer og beskrivelser er gældende for alle madrastyper, med mindre andet er beskrevet.

Inden madrasserne anvendes bedes følgende tjekkes:

- Kontroller at madrassen passer til sengen.
- Kontroller at madrassen vender korrekt, hvilket fremgår af labelen på madrassen.

1.2 Sikkerhedsinstruktioner



Vigtig advarsel!

Denne brugermanual skal læses grundigt før madrasserne tages i brug:

- I henhold til EN 60601-2-52 skal det sikres, at der er minimum 22 cm fra overfladen af madrassen til overkanten af sengehesten, når denne er slået op.
- Madrassens vægtbelastning må ikke overskrides.
- Madrassen (skum og betræk) er opbygget af brandhæmmende materiale, dog frarådes det, at ryge eller have åben ild i nærheden.
- Husk at tjekke sengens brugervejledning, inden madrassen anvendes i sengen.

Note: WinnCare Nordic ApS fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt madrassen er forandret eller sammensat på anden vis end angivet i brugervejledningen.

2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG DIMENSIONER

Alle typer af madrasserne er forsynet med 4 løftehåndtag - 2 på hver side. Derudover er Delta madrasserne forsynet med yderligere 1 håndtag i hver ende.

Disse håndtag må kun anvendes til flytning af madrassen, f.eks. fra en seng til et depotrum.



Note: Håndtagene må ikke bruges til at forflytte en bruger, som ligger på madrassen.

Madrassernes materiale er brandhæmmende og godkendt efter EN 597-1 og EN 597-2.

Madrasserne er dansk produceret.

2.1 Alpha og Delta

Alpha og Delta madrasserne består begge af 9 cm koldskum og 5 cm viskoseelastisk skum. Koldskummet i bunden af madrassen har en høj rumvægt og er med til at give madrassen en længere levetid.


Den æggebakkede udformning af det viskoseelastiske skum sikrer en optimal liggekomfort og giver en bedre ventilation til madrassen.

Desuden giver udformningen en unik trykaflastende egenskab, som gør det optimalt for brugeren at ligge på.

Alpha:

Denne madras har samme højde i hele længden.

Madrassen er økotex godkendt.

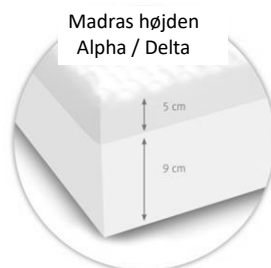

Alpha madrasserne fås i to størrelser:


	Højde	Længde	Bredde	Vægt i kg
Alpha - 83 cm	14 cm	200 cm	83 cm	10,3
Alpha - 88 cm	14 cm	200 cm	88 cm	10,8

Delta:

Denne madras har en lavere fodende.

Den sænkede fodende giver en trykfordelende effekt, som virker fra skulderne og ned til hælene.

Madrassen er økotex godkendt.

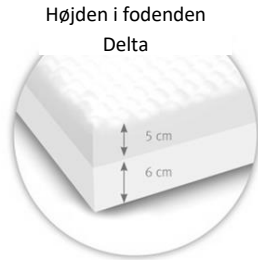


Delta madrasserne fås i fire størrelser:

	Højde	Længde	Bredde	Vægt i kg
Delta - 80 cm	14 cm / 11 cm	200 cm	80 cm	10,0
Delta - 83 cm	14 cm / 11 cm	200 cm	83 cm	10,3
Delta - 85 cm	14 cm / 11 cm	200 cm	85 cm	10,5
Delta - 88 cm	14 cm / 11 cm	200 cm	88 cm	10,8

2.2 Kappa

Madrassen har samme Waterlilly koldskum hele vejen igennem. Skummet har en høj rumvægt, hvilket er med til at give madrassen en længere levetid.

Det elastiske materiale og den høje bæreevne, samt skæringerne i madrassen sikrer optimal liggekomfort.

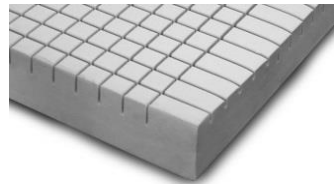

Madrassen er økotex godkendt.

Kappa madrasserne fås i to størrelser:

	Højde	Længde	Bredde	Vægt i kg
Kappa - 83 cm	14 cm	200 cm	83 cm	14,3
Kappa - 88 cm	14 cm	200 cm	88 cm	14,8

2.3 Forlængerstykke

Til madrasserne er der mulighed for, at tilkøbe et forlængerstykke i samme materiale som Alpha og Delta. Forlængerstykket kan også anvendes til Kappa.

Forlængerstykkets betræk er forsynet med 20 cm ekstra overlap til at lægge under madrassen, for at holde forlængerstykket bedre på plads.

Forlængerstykket skal altid placeres i hovedenden.

2.4 Betræk

Betrækket på alle typer madrasser er et inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f.eks. urin eller blod ikke trænger igennem til skummet. Mellem betrækket og skummet er der en tricot, som gør det lettere at af- og påmontere betrækket.

Betrækket er fremstillet i 100 % polyester med en coating af 100 % polyurethan og er allergivenligt.

Betrækket er brandhæmmende efter BS crib 5 og crib 7.

Betrækket er svejst.

Betrækket til Alpha og Kappa har lynlås på 3 sider med 2,5 cm overlap.

Betrækket til Delta har lynlås på 4 sider med 6 cm overlap og antiskrid på undersiden.

3 VEDLIGEHOLDELSE

Betrækket skal efterses for skader min. en gang om måneden.

I tilfælde af beskadigelse, må betrækket ikke anvendes, før det er repareret.

3.1 Rengøring



Skummet i madrasserne må ikke rengøres.

- Betrækket må vaskes ved 95 °C og tørretumbles ved lav varme – maks. 50°C.
- I det daglige kan betrækket rengøres med en let fugtig klud tilsat almindelige rengøringsmidler.
- Betrækket skal være tørt, inden det trækkes på skummet.

Note: Inden madrassen anvendes til en anden person anbefales det, at betrækket vaskes.

3.2 Opbevaring

Madrassen skal opbevares ved normal indendørs temperatur (+2 – +40°C) og ved normal luftfugtighed (40-90%).

Madrassen må ikke rulles sammen.

4 MILJØ OG KVALITET

Madrasserne har en forventet levetid på 5 år forudsat at almindelige vedligeholdelses- og plejeanvisninger er overholdt.

4.1 Bortskaffelse

Både madras og betræk kan bortskaffes i stort brændbart på genbrugspladser.

Bortskaffelsen kan ligeledes ske til WinnCare Nordic ApS.

4.2 Kvalitetsgodkendelser

WinnCare Nordic ApS er certificeret efter standarderne ISO 9001 og ISO 13485.

Disse certificeringer betyder, at produkterne og virksomheden lever op til de gældende internationale standarder for kvalitetsstyring, samt standarder for sporbarhed af medicinske produkter.

Madrasserne er klassificeret som Medicinsk Udstyr Klasse 1 produkt.

4.3 Symboler og forkortelser



Må vaskes ved 95°.



Rens i perchlor, mineralsk terpentin eller lignende.



Tørretumbles ved lav varme - max. 50°.



Tåler ikke blegning. Gælder for alle kulørte varer.



Må ikke stryges.



Brugervejledning.



CE-mærket.

5 TILBEHØR

Forlængerstykker (BxLxH)

023-00023	Forlængerstykke - 80x20x14 cm
023-00012	Forlængerstykke - 83x10x14 cm
023-00006	Forlængerstykke - 83x15x14 cm
023-00013	Forlængerstykke - 83x20x14 cm
023-00037	Forlængerstykke - 85x15x14 cm
023-00024	Forlængerstykke - 85x20x14 cm
023-00014	Forlængerstykke - 88x10x14 cm
023-00015	Forlængerstykke - 88x20x14 cm
023-00007	Forlængerstykke - 88x15x14 cm
023-00034	Forlængerstykke - 90x15x14 cm
023-00036	Forlængerstykke - 90x20x14 cm

Madrasbetræk (BxLxH)

023-00025	Madrasbetræk - 80x200x14 cm, Delta
023-00008	Madrasbetræk - 83x200x14 cm, Alpha
023-00041	Madrasbetræk - 83x200x14 cm, Delta
023-00043	Madrasbetræk - 85x200x14 cm, Alpha
023-00026	Madrasbetræk - 85x200x14 cm, Delta
023-00009	Madrasbetræk - 88x200x14 cm, Alpha
023-00042	Madrasbetræk - 88x200x14 cm, Delta
023-00035	Madrasbetræk - 90x200x14 cm, Alpha

023-00027	Forlængerstykke betræk - 80x20x14 cm
023-00016	Forlængerstykke betræk - 83x10x14 cm
023-00010	Forlængerstykke betræk - 83x15x14 cm
023-00017	Forlængerstykke betræk - 83x20x14 cm
023-00040	Forlængerstykke betræk - 85x15x14 cm
023-00028	Forlængerstykke betræk - 85x20x14 cm
023-00030	Forlængerstykke betræk - 88x10x14 cm
023-00011	Forlængerstykke betræk - 88x15x14 cm
023-00029	Forlængerstykke betræk - 88x20x14 cm
023-00038	Forlængerstykke betræk - 90x15x14 cm
023-00039	Forlængerstykke betræk - 90x20x14 cm

Fabrikant:
WinnCare Nordic ApS
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Denmark

Phone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: info@ergolet.dk
www.ergolet.com

93/42/EØF CLASS I
EN/ISO 10535
EN 60601-1-2
UM-910-00773DK

